

Rygstøtte til Carbon Ultralight

STØTTER DIN NEDRE RYG MENS DU SIDDER



Tillykke med den nye Rygstøtte til din Carbon Ultralight rollator designet af byACRE.

Rygstøtten giver dig mulighed for, at opnå en god understøtning af din ryg, når du tager et hvil på farten.
Rygstøtten på- og afmonteres let.



byACRE


Brug af Rygstøtten

Rygstøtten monteres nemt rundt om håndtagsjusteringskinnen.
Bemærk at nitten på Rygstøtten er beregnet til montering i det øverste hul på håndtagsjusteringen.


⚠ Vær opmærksom på at Rygstøtten ikke vikles sammen med sædet når rollatoren foldes ud eller sammen.

Så kan du læne dig tilbage og nyde pausen.


Montering

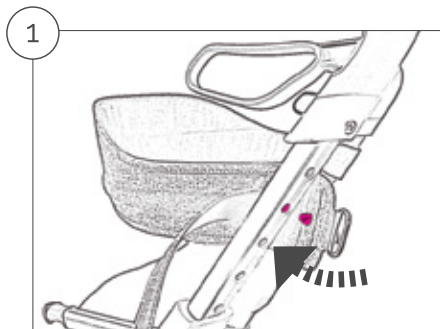


1. Løsn velcro-stroppen og indfør nitten i et af hullerne på højdejusteringskinnen.

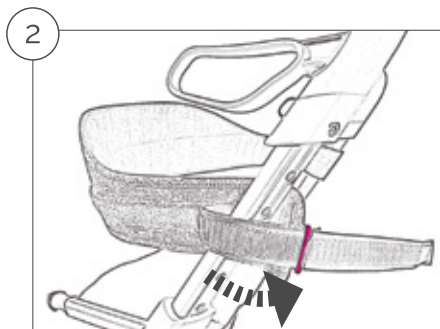

2. Før velcro-stroppen gennem metalspændet for enden af Rygstøtten.

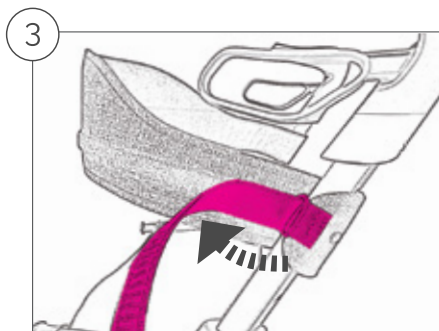

3. Spænd velcro-stroppen

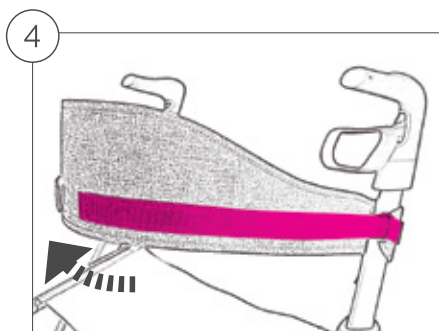

4. Fastgør velcro-stroppen til modstykket på Rygstøtten samtidigt med at stroppen holdes spændt således, at monteringen bliver tilstrækkeligt stram.

Gentag trin 1-4 på den modsatte side og kontroller at Rygstøtten er monteret på sikker vis.

Tekniske specifikationer

Materiale: 100 % polyester

Bredde: 860 mm

Dybde: 80 mm

Højde: 130 mm

Vægt: 150 g

Maksimal bæreevne: 130 kg

Vedligeholdelse

Rygstøtten kan vaskes i hånden.

Garanti

Rygstøtten kommer med 2 års garanti, der dækker produktionsfejl. Garantien dækker imidlertid ikke slitage som følge af almindeligt brug.

Designet i Danmark af:

byACRE ApS

Bygmarken 4

3520 Farum

Danmark