


Carbon Ultralight

FAHRE FORT, DIE WELT ZU ENTDECKEN

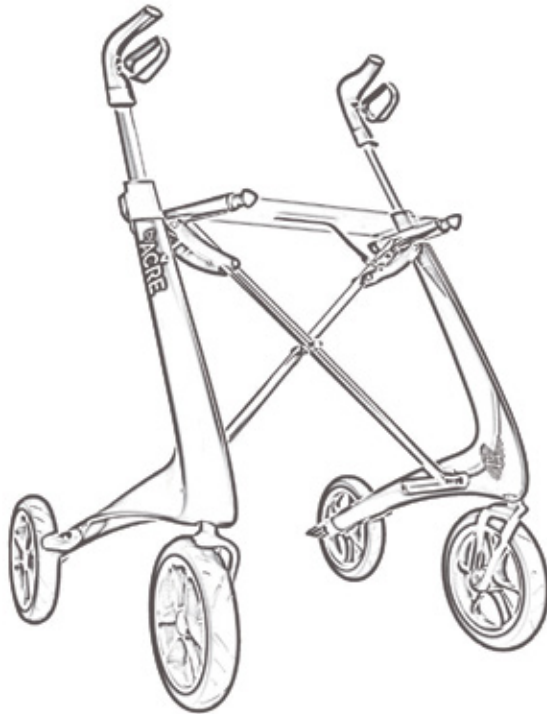


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Carbon Ultralight Rollator, einer der leichtesten Rollatoren seiner Klasse. Um Ihren Carbon Ultralight sicher und optimal nutzen zu können, ist es wichtig die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen.




Bedienungsanleitung


Auseinanderfalten

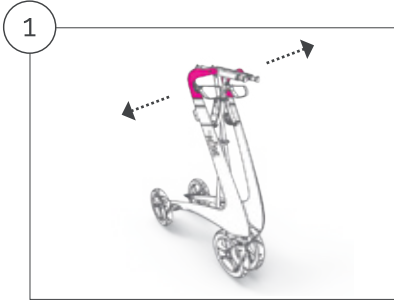

1. Die Seitenteile am Griff nach außen schieben ziehen.

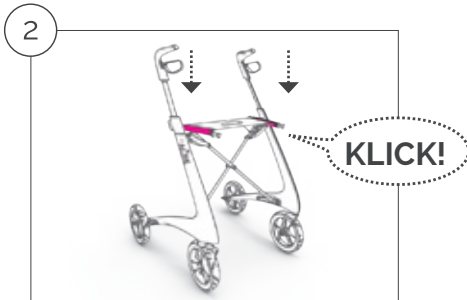


2. Den Sitz nach unten drücken bis ein hörbarer Klick erfolgt.

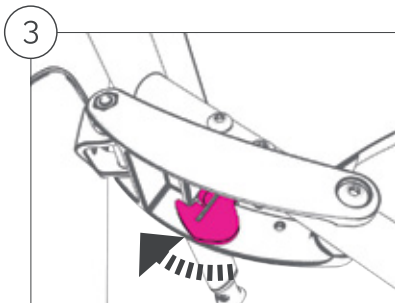


3. Wenn Sie nicht sicher sind, ob der Faltmechanismus korrekt verriegelt ist, z.B. in einer lauten Umgebung, dann Überprüfen Sie ob der Verriegelungshaken unter dem Sitz richtig eingerastet ist.

Zusammenfalten

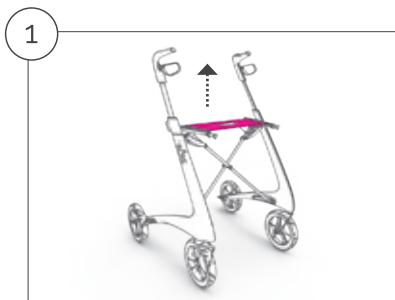


1. Greifen Sie von der Nutzerseite in Fahrtrichtung in die Aussparung der Sitzfläche um den Rollator zu falten.

Heben Sie die Sitzfläche an der Aussparung in der Mitte an, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.

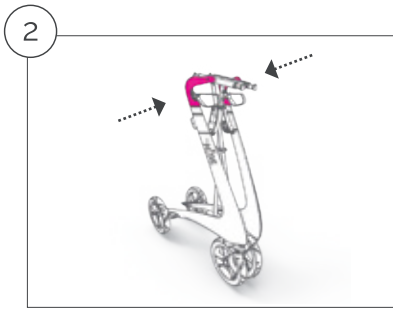


- Um sicher zu stellen, dass der Rollator komplett gefaltet ist, heben Sie die Seiten des Sitzes an oder schieben Sie die Griffe zueinander.

Einstellung der Griffhöhe

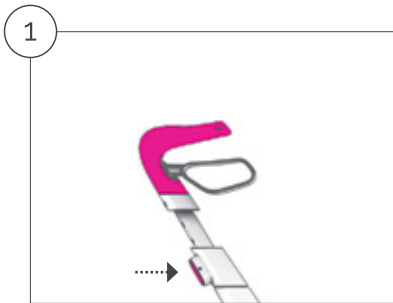

Aus ergonomischen und sicherheitstechnischen Gründen ist es wichtig, dass die Griffhöhe richtig eingestellt ist. Die korrekte Einstellung der Griffe ist sehr individuell. Es wird empfohlen, die Handgriffe auf Handgelenkhöhe bei hängendem Arm und aufrechtem Stand einzustellen. Beide Handgriffe sind auf gleicher Höhe zu justieren. Wenn Sie hier nicht sicher sind, sollten Sie Ihren Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder einen anderen Spezialisten konsultieren.


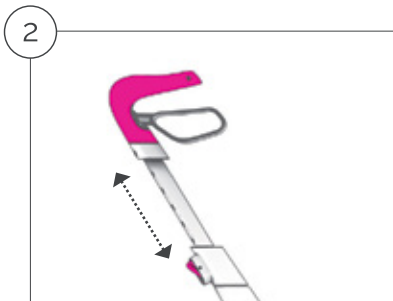


- Drücken Sie auf den hellen Knopf am Rahmen unterhalb des Griffes, um die Höhe zu verstellen, während Sie den Griff mit einer Hand festhalten.
- Halten Sie den Knopf gedrückt und stellen Sie den Griff auf die gewünschte Höhe ein und lassen Sie dann den Feststellknopf los.



- Vergewissern Sie sich, dass der Griff in einer sicheren Position eingerastet ist, indem Sie ihn nach oben und unten bewegen bis die Höhenverstellung in der verriegelten Position ist. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um beide Griffe auf die gleiche Höhe einzustellen.

Bremsen

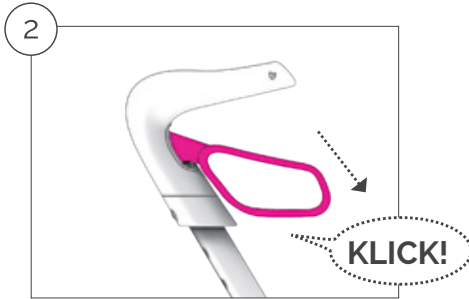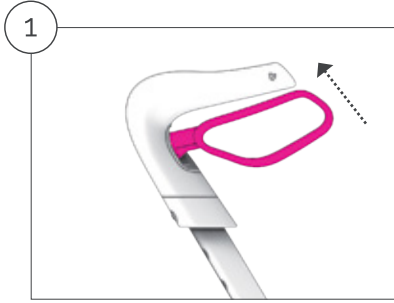


Der Carbon Ultralight ist mit zwei unabhängigen Bremsen ausgestattet, die auf die Hinterräder wirken.

1. Bremshebel nach oben ziehen, um die Fahrbremse zu aktivieren. Beim Loslassen des Bremshebels bewegt er sich wieder in die Neutralstellung.
2. Drücken Sie beide Bremshebel nach unten bis diese einrasten, dann ist die Feststellbremse aktiviert. Lösen Sie die Feststellbremse, indem Sie den Bremshebel wieder in die Neutralstellung bringen. Unter normalen Umständen sollten beide Bremsen gleichzeitig aktiviert werden.


- ⚠ Seien Sie sich bewusst, dass wenn nur eine Bremse betätigt wird, sich der Carbon Ultralight auch in die Richtung der angezogenen Bremse drehen wird.
- ⚠ Bevor Sie sich hinsetzen, beide Bremsgriffe nach unten drücken bis diese einrasten.
- ⚠ Nicht mit aktivierten Feststellbremsen aufbewahren, da eine längere Aktivierung der Feststellbremse sichtbare Markierungen am Rad hinterlassen und die Bremsleistung verringert werden kann.
- ⚠ Diese Bremsen sind NICHT geeignet für ein permanentes „Anbremsen“ während der Nutzung.

Einstellung der Bremsen

Die Bremse sollte eingestellt werden, wenn die auf das Rad ausgeübte Bremskraft unzureichend ist (dies kann auftreten, wenn der Reifen durch die Bremse abgenutzt ist) oder die Feststellbremse schwer zu aktivieren ist (was am häufigsten nach dem Austausch eines abgefahrenen Reifens vorkommen kann). Setzen Sie den Griff immer auf die gewünschte Höhe, bevor die Bremse eingestellt wird, da die Position eine kleine Variation der Bremsenverstellung verursachen kann.

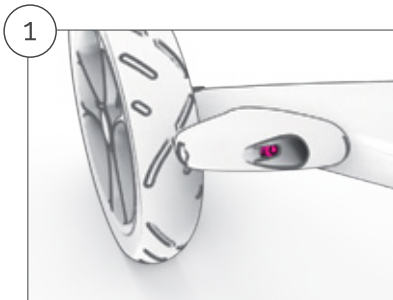


1. Bremse mit einem 3mm Inbusschlüssel einstellen. Setzen Sie den Inbusschlüssel in die Einstellschraube durch die Öffnung an der Vorderseite des Bremsblocks ein.

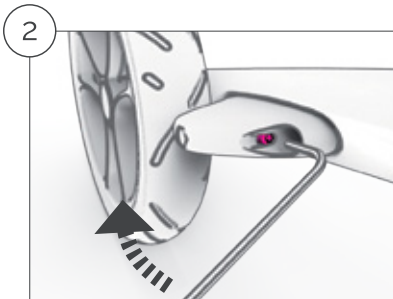


2. Die Bremse wird durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) angezogen und durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (von vorne gesehen) gelockert.

Ankipphilfe

Obwohl der Carbon Ultralight einer der leichtesten Rollatoren und leicht anzuheben ist, ist er mit einer Ankipphilfe ausgestattet, die es Ihnen erleichtert, kleinere Hindernisse wie Bordsteinkanten und niedrige Stufen zu überwinden. Dies ist besonders hilfreich, wenn schwere Gegenstände in der vorderen Tasche oder Beutel transportiert werden.

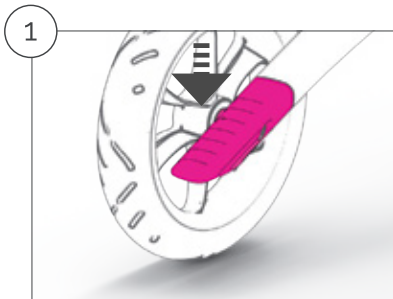


1-2. Befolgen Sie immer die Installations- und Bedienungsanleitung, die mit dem Zubehör geliefert wird. Die maximale Nutzlast für der Taschen und Körbe ist immer in der Anleitung des Zubehöres angegeben.

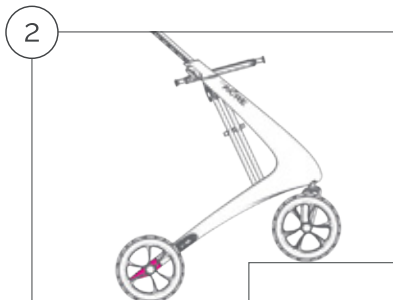

⚠ Verwenden Sie nur Original-Zubehör, da es keine Garantie dafür gibt, es nicht mit dem Carbon Ultralight getestet wurde und daher nicht sicher zu bedienen ist.

Technische Daten

Gewicht ohne Zubehör: 4,95kg
Max Höhe: 790-910mm
Max Breite: 630mm
Max Länge: 666mm
Sitzhöhe: 600mm
Raddurchmesser: 200mm
Max Nutzergewicht: 130kg
Rahmen: 100% Kohlenstoff-Verbundstoff
Griff: TPE
Sitz: Polyester mit einer PVC-Beschichtung auf der Rückseite für verbesserte Festigkeit.
Seriennummer Sticker befindet sich unter dem rechten Seitenteil neben den Hinterrad.
HMV-Nr: 106780

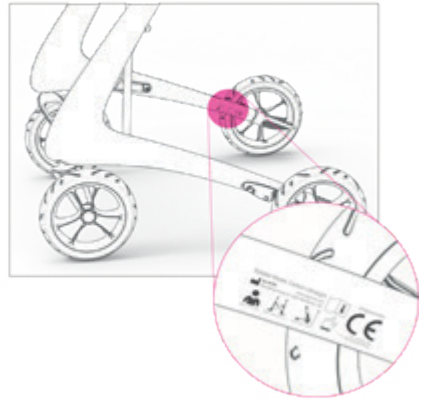

Zweckbestimmung

Der Carbon Ultralight ist für den Gebrauch drinnen und draußen entwickelt und geprüft. Er soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Er bietet die Möglichkeit sich auf dem Sitznetz auszuruhen.

Accessories

Der Carbon Ultralight kann mit Original-Zubehör wie Taschen und einer Rückenlehne noch nützlicher gestaltet werden. Entdecken Sie die Möglichkeiten auf www.byacre.com. Das Zubehör ist speziell für Carbon Ultralight konzipiert und wurde dafür getestet, um sicher zu stellen, dass es den geltenden Normen und regulatorischen Anforderungen entspricht.

⚠️ Befolgen Sie immer die Installations- und Bedienungsanleitung, die mit dem Zubehör geliefert wird. Die maximale Nutzlast für Taschen und Körbe ist immer in der Anleitung des Zubehörs angegeben.

Verwenden Sie nur Original-Zubehör, da es keine Garantie dafür gibt, es nicht mit dem Carbon Ultralight getestet wurde und daher nicht sicher zu bedienen ist.

Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch

- ⚠️ Achtung: Beim Auseinander- und Zusammenfallen besteht Klemm- und Quetschgefahr.
- ⚠️ Prüfen Sie, dass der Rollator in der entfalteten Position arretiert ist. Sicher funktioniert und der Rollator durch einen hörbaren <Klick> sicher eingerastet ist.
- ⚠️ Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen.
- ⚠️ Der Rollator darf nicht von Personen mit einem Gewicht von über 130kg benutzt werden.
- ⚠️ Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.
- ⚠️ Der Rollator ist kein Spielzeug.

- ⚠️ Prüfen Sie, dass die Höheneinstellung der Handgriffe richtig eingerastet sind und die Griffstangen nicht höher eingestellt werden als die markierte maximale Einstellung am Rohr anzeigt.
- Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.
- ⚠️ Unterlassen Sie Änderungen/Modifikationen am Rollator. Diese können die Sicherheit negativ beeinflussen und die Herstellerhaftung erlischt.

Sicherheitshinweise beim Gebrauch

- ⚠️ Beim Anhalten oder Parken immer die Bremse unter den Griffen nutzen.
- ⚠️ Beide Feststellbremsen müssen vor Nutzung des Sitzes aktiviert sein.
- ⚠️ Für Ihre eigene Sicherheit ist es nicht erlaubt, sich auf dem Carbon Ultralight sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen oder beugen. Den Rollator nicht mehr als max. 5 Grad zur Seite neigen. Sturzgefahr! Aus demselben Grund sollten Taschen o.ä. nie an den Handgriffen befestigt werden.
- ⚠️ Die Fahrbremse kann etwas nach oben gezogen werden um die Geschwindigkeit zu verringern. Achtung: Während des Gehens sollte nicht die Feststellbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent angezogen werden.
- ⚠️ Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am Körper gehalten werden.
- ⚠️ Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu halten.
- ⚠️ Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine falsche Belastung besteht und die Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator laufen.
- ⚠️ Beachten Sie, dass auf abschüssigen Wegen die Rollgeschwindigkeit des Rollators höher sein kann als Ihre Gehgeschwindigkeit. Hier besteht Sturzgefahr!
- ⚠️ Den Rollator nicht auf Treppen nutzen. Besondere Vorsicht ist geboten, beim Heruntergehen von Bordsteinen.
- ⚠️ Achten Sie stets darauf, dass sich Ihre Hose/ Ihr Rock nicht im Rad oder in anderen Teile des Rollators einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr. Wir empfehlen deshalb auf das Tragen von weiter und langer Kleidung zu verzichten.
- ⚠️ Während der Fahrt in einem öffentlichen Verkehrsmittel ist aus Sicherheitsgründen das Sitzen auf dem Rollator untersagt. Stellen Sie Ihren Rollator sicher ab und betätigen Sie die Feststellbremse.

Reinigung

Ist Ihr Carbon Ultralight nach einem Ausflug verschmutzt, können Sie ihn mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln abspülen und -spritzen. Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuer- oder Schleifmittel sowie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger. Eine professionelle Desinfektion, wie es durchaus in Pflegeeinrichtungen notwendig ist, sollte nur durch autorisiertes

Fachpersonal vorgenommen werden.

Der Carbon Rollator kann mit einem Desinfektionsmittel, das 70-80% Ethanol enthält, abgewischt werden. Unsachgemäße Handhabung und daraus resultierende Schäden und Verletzungen sind nicht vom Hersteller zu verantworten.

Der Sitz kann mit wasser- und schmutzabweisendem Spray behandelt werden.

Inspektion / Wartung / Wiedereinsatz

Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen eine Inspektion und

Wartung des Rollators und der folgenden Teile am Rollator vorzunehmen.

⚠ Die Häufigkeit ist davon abhängig, wie intensiv und wie stark der

⚠ Rollator genutzt wird:

⚠ Rohre, Rahmen und Schrauben

⚠ Handgriffe und Handgriffrohre

Bremsen und Bremsgriffe inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern
Räder, Sitz und Zubehör

Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zum Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.

Gewährleistung

Die Gewährleistung des Carbon Ultralight beträgt 2 Jahre. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Montageaufwand, natürlicher Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Reifen, Sitznetz, Tasche und Handgriff zu verstehen. Für Reparaturen in der Gewährleistungszeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus.

Die Garantie auf den Rollator ist 2 Jahre. byACRE bietet zusätzliche 3 Jahre der Garantie auf den Rahmen. Erstelle einfach einen Account bei www.byacre.com und registrieren Ihr Produkt innerhalb von drei Monaten, nach dem Kauf Um die Garantie zu behalten, bitte Denken Sie daran, Ihren Beweis zu speichern Kauf.

Hergestellt in Dänemark von:
byACRE ApS
Bygmarken 4
3520 Farum
Denmark

by  **ACRE** |