


# Carbon Ultralight

BLIJF DE WERELD ONTDEKKEN

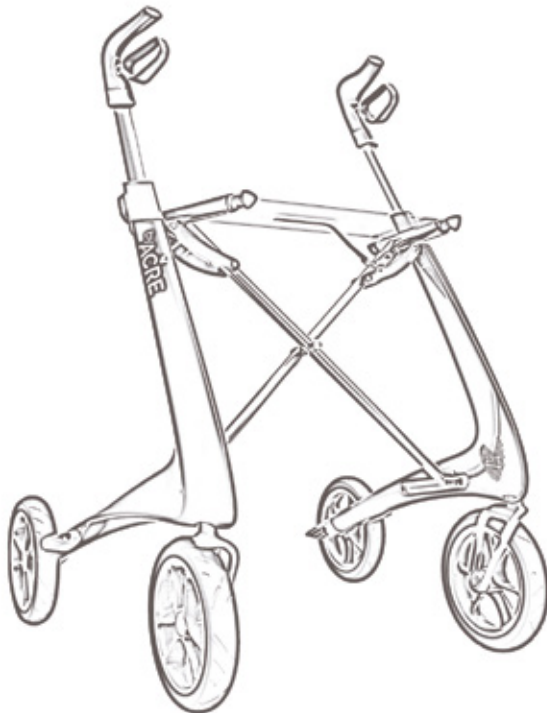




Gefeliciteerd met uw nieuwe Carbon Ultralight. Dit is de lichtste rollator ter wereld!

Om alle mogelijkheden van uw Carbon Ultralight te benutten is het belangrijk om deze handleiding te lezen.



# Gebruik van de Carbon Ultralight

## Uitvouwen

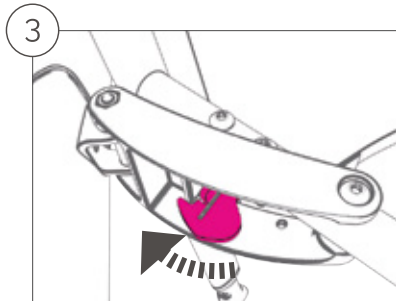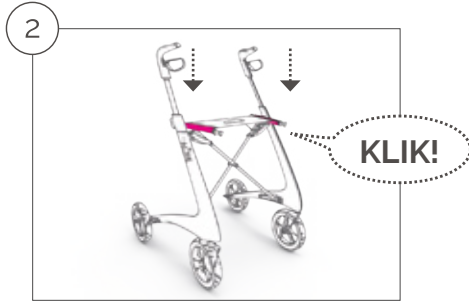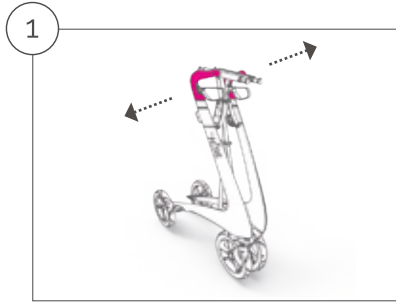


1. Duw beide handvaten naar buiten toe
2. Duw naar Beneden aan beide uiteinden van het zitje totdat u een klik hoort.
3. Indien u twijfelt of de rollator goed is vastgemaakt in open positie, gelieve na te kijken dat het haakje onder het zitje goed is vastgeklikt.


## Dichtklappen



1. Plaats uw hand door de gleuf in het zitje en trek het zitje naar omhoog totdat de rollator in elkaar vouwt.
2. Om u te verzekeren dat de rollator volledig is dichtgevouwen, kunt u best beide handgrepen naar binnen duwen.

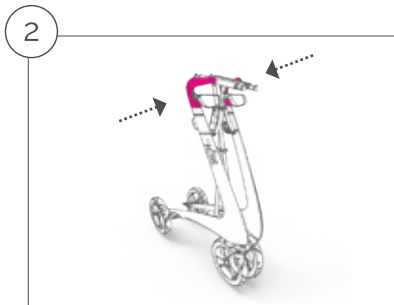



## Hoogte instellen van de handgrepen

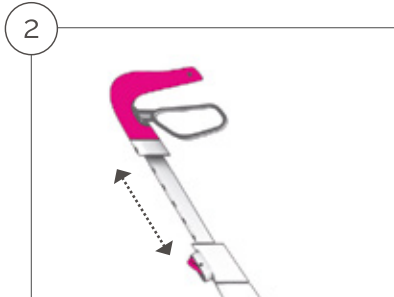

Voor zowel ergonomische als om veiligheidsredenen, is het belangrijk dat de handgrepen op de correcte hoogte zijn ingesteld. Het correct regelen van de handvaten in de hoogte is iets zeer persoonlijk. Een goede algemene regel is dat de hoogte gelijk moet zijn aan de hoogte van uw polsen, wanneer u recht staat met uw armen gestrekt langs uw lichaam. Indien u twijfelt aan de correcte hoogte van de handgrepen, dan vraagt u het best aan uw arts, kinesitherapeut of ergotherapeut.

1. Duw met de ene hand op de heldere knop op het frame, terwijl u met de andere hand de handgreep houdt.
2. Stel de handgreep in op de gewenste hoogte en laat de knop los.
3. Gelieve goed na te kijken dat de handvat goed is vastgeklit en niet meer in beweging kan komen.

# Remmen

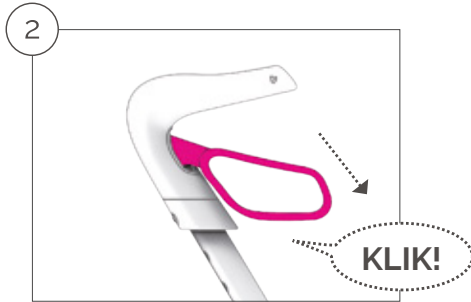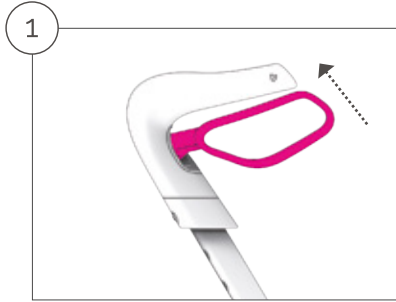


De Carbon Ultralight is uitgerust met 2 onafhankelijke remmen die beiden de op achterwielen remmen.


1. Trek de rembeugel naar omhoog om de rem te activeren. De rem komt automatisch weer los wanneer u de rembeugel loslaat.
2. De parkeerrem kunt u inschakelen door de rembeugel naar beneden te duwen totdat u een klik hoort. U kunt de parkeerrem weer uitschakelen door de rembeugel weer naar zijn neutrale positie te duwen.

- ⚠️ Onder normale omstandigheden dienen beide remmen tezamen ingeschakeld te worden.
- ⚠️ Let op! Indien slechts één van de twee remmen is ingeschakeld, dan zal de rollator draaien naar de richting van dat ene ingeschakelde rem.
- ⚠️ Gelieve altijd beide parkeerremmen in te schakelen wanneer u gaat zitten
- ⚠️ Laat de parkeerrem niet ingeschakeld wanneer u de rollator niet gebruikt. Een parkeerrem dat langdurig ingeschakeld blijft kan sporen nalaten op de banden. Dit kan dan het "normaal" remmen minder efficiënt maken bij het stappen.

# Het instellen van de remmen

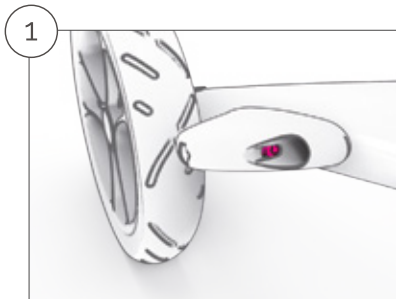


De remmen moeten afgesteld worden indien de druk die de remmen op de wielen uitoefenen te klein is (dit kan het geval zijn indien het wiel versleten is), of indien het zeer hard is om de parkeerremmen in te schakelen (dit kan het geval zijn net nadat versleten wielen zijn vervangen). Gelieve altijd

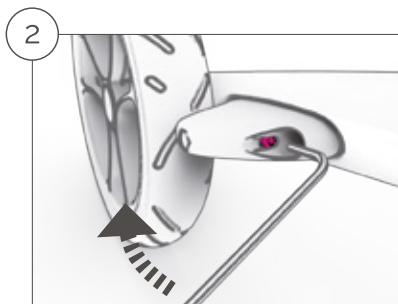


eerst de handgrepen op de juiste hoogte te plaatsen voordat u de remspanning regelt omdat de hoogte van de handgrepen ook een invloed kan hebben op de spanning van de remkabels.

1. Regel de rem met een Allen sleutel 3mm. Plaats de Allen sleutel in het regelvijsje door het gaatje ter hoogte van de remplaat.
2. De spanning wordt vergroot door de sleutel wijzer zin te doen draaien en omgekeerd.

## Stoephulp

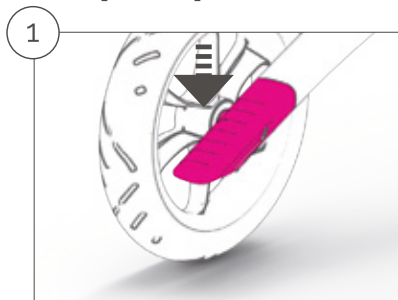

Ook al is de Carbon Ultralight de lichtste rollator op de markt, en daardoor ook makkelijker om over stoepanden te tillen, toch is hij ook uitgerust met een stoephulp voor een maximaal comfort van de gebruiker. Deze stoephulp is vooral handig wanneer u wat zwaardere objecten hebt geplaatst in het tasje.

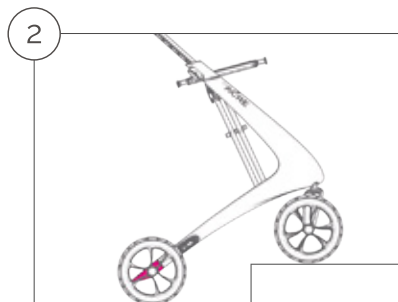

- 1-2. Duw met uw voet op het stoephulp en trek de handgrepen een beetje naar u toe, om de voorwielen van de grond op te heffen.

⚠ Let op! De stabiliteit van de Carbon Ultralight verandert wanneer men hem achteroverleunt. Het is beter om zoveel mogelijk stoepanden om te zeilen dan ze te nemen.

## Technische fiche

Gewicht zonder de accessoires: 4950g

Max hoogte: 790-910mm

Max breedte: 630mm

Max lengte: 666mm

Zithoogte: 600mm

Diameter van de wielen: 200mm

Max gebruikersgewicht: 130kg

Getest en goedgekeurd volgens de norm EN ISO 11199-2:2005

## Accessoires

U kunt uw Carbon Ultralight personaliseren met originele accessoires zoals tassen of een ruggensteun. U vindt de beschikbare accessoires op [www.byacre.com](http://www.byacre.com). De accessoires zijn speciaal ontworpen voor de Carbon Ultralight en zijn ook getest op de Carbon Ultralight om te voldoen aan alle veiligheids- en wettelijke voorschriften.

Gelieve steeds de handleiding, die met de accessoire is geleverd, te volgen. Het maximum toegestane gewicht voor tassen is altijd vermeld in de handleidingen.

⚠ Gebruik nooit accessoires die niet origineel zijn, omdat u daarbij geen garantie hebt dat ze getest zijn met de Carbon Ultralight, waardoor u dan ook niet zeker bent van hun veiligheid

## Onderhoud en reiniging

Gelieve uw rollator regelmatig te reinigen van vuil en stof. Let vooral op om de remblokken proper te houden zodat deze steeds goed functioneren.

Alle oppervlakten kunnen gereinigd worden met een stoffen doek en proper water. Indien nodig kunt u ook een beetje niet-abrasief detergent gebruiken. Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om de vijzen aan te spannen. Dit kunt u doen met een Allen sleutel 3mm.

Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage moeten tijdig vervangen worden voordat ze een risico dreigen te vormen. Elk defect onderdeel dient meteen te worden vervangen. Gebruik nooit de Carbon Ultralight als er iets aan is dat defect is. Contacteer uw verdeler voor service.

## Tips voor een veilig gebruik

Altijd de remmen controleren voor het gebruik van de Carbon Ultralight. De remmen zijn zeer belangrijk voor uw veiligheid.

Een van de voordelen van een zeer lichte rollator is dat het gemakkelijker wordt om hellingen op en af te gaan. U moet minder gewicht naar omhoog duwen wanneer u naar boven gaat, en u moet minder gewicht tegenhouden wanneer u naar beneden gaat. Let er wel op dat de stabiliteit van een rollator wijzigt wanneer u op een helling stapt. Let vooral op bij het stappen op een ondergrond dat zijwaarts helt.

Ook als is de Carbon Ultralight uitgerust met soepele banden, die comfort bieden op oneven terrein, toch is het belangrijk dat u altijd goed kijkt waar u stapt. Let op dat sommige accessoires of objecten die u draagt uw zicht kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat u vermijdt dat de rollator plots tegen iets botst en stopt, dit verhoogt namelijk het risico tot vallen.

Het zitje van de Carbon Ultralight kan u enkel gebruiken als beide parkeerremmen ingeschakeld zijn. Het zitje is niet geschikt om mensen te vervoeren. Deze rollator is niet bedoeld om kinderen te vervoeren. Een rollator is geen speelgoed voor kinderen. Let ervoor op dat kinderen niet op de rollator gaan kruipen.

# Garantie

Op de Carbon Ultralight is er 2 jaar garantie. U kunt de garantieperiode uitbreiden door uw rollator te registreren op [www.byacre.com](http://www.byacre.com). De garantie dekt geen schade door abnormaal gebruik en ook geen schade als gevolg van een normale slijtage.



Er is 2 jaar garantie op de rollator. byAcre verleent 3 jaar extra garantie op het kader.

Gelieve hiervoor een account aan te maken op [www.byacre.com](http://www.byacre.com) en uw product te registreren binnen de 3 maanden na uw aankoop.

Voor uw grantie, geliev ook uw aankoopbewijs bij te houden.

Fabriqué au Danmark par:  
byACRE ApS  
Bygmarken 4  
3520 Farum  
Denmark

by  **ACRE**