


Organizer Tasche für Carbon Ultralight

MOBILITÄT VERBESSEREN

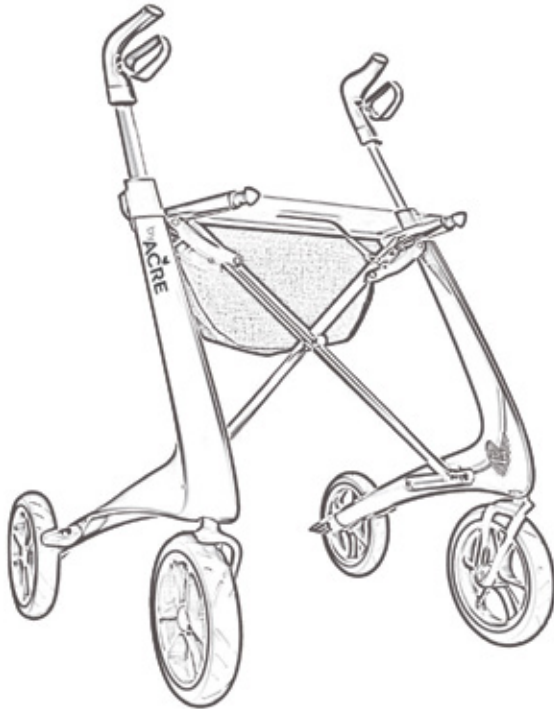

Herzlichen Glückwunsch zu Ihre neuen Organizer Tasche für Ihren byACRE Carbon Ultralight Rollator. Der Organizer ist eine Multifunktions-Tasche, die körpernah am Rollator angebracht ist und so stets griffbereit in ihrer Nähe. Die Position zwischen Körper und Rollator gibt Ihnen das Gefühl von Sicherheit und der Inhalt ist mit einem praktischen Reißverschluss vor fremden Zugriffen geschützt.


Um den Organizer optimal nutzen zu können ist es wichtig die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen.

Gebrauchsanweisung


Die Organizer-Tasche ist durch Öffnen des Reißverschlusses leicht zugänglich. Denken Sie daran, die Tasche beim Gehen zu schließen, um zu vermeiden, dass Sie Gegenstände verlieren.

- ⚠ Füllen Sie den Organizer nicht mehr als er im geschlossenen Zustand fassen kann.
- ⚠ Überladen Sie den Organizer nicht (Tragkraft max. 0,5 kg).

Befestigung

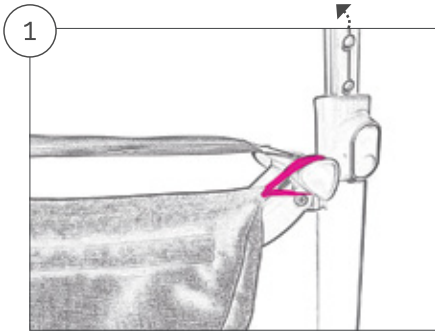


1. Zur einfachen Befestigung falten Sie bitte den Carbon Ultralight Rollator ein wenig zusammen. Befestigen Sie die Organizer-Tasche, indem Sie die beiden seitlichen Schlaufen um die Taschenaufnahmen am vorderen Ende der Sitzstange legen. Vergewissern Sie sich, dass der Reißverschluss Ihnen zugewandt ist.

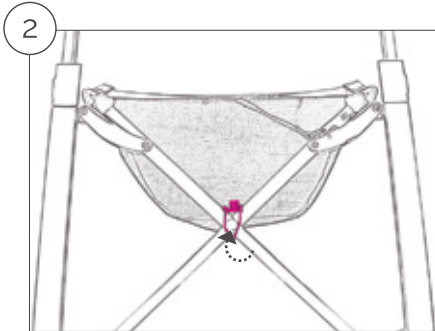


2. Legen Sie das Verschlussband um die Mitte der Kreuzstreben und schließen Sie den Druckknopf. Falten Sie den Rollator auf. Die Organizer-Tasche ist jetzt sicher am Carbon Ultralight Rollator befestigt und einsatzbereit.

Demontage

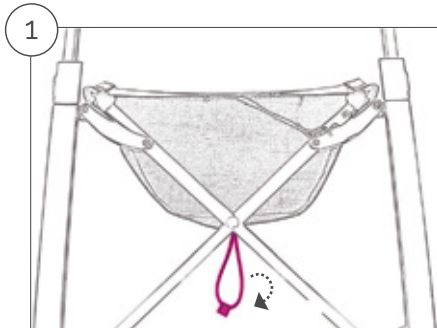

1. Falten Sie den Carbon Ultralight Rollator ein wenig zusammen. Öffnen Sie den Druckknopf am Verschlussband.

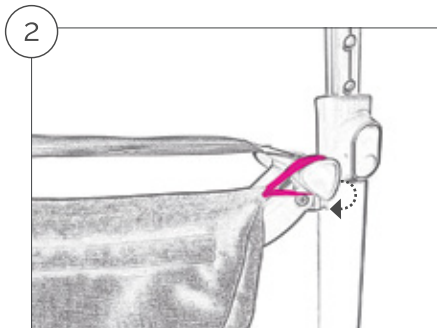

2. Lösen Sie die beiden seitlichen Befestigungsschlaufen von den Befestigungspunkten des Carbon Ultralight Rollators.

Technische Daten

Material: 100% Polyester

Breite: 450mm

Tiefe: 105mm

Höhe 185mm

Gewicht: 90g

Tragkraft: 0,5kg

Reinigung

Die Tasche kann von außen feucht abgewischt oder mit Handwäsche kalt gepflegt werden

Gewährleistung

Die Gewährleistung der beträgt 2 Jahre. Ausgenommen von der Gewährleistung sind natürlicher Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Für Reparaturen in der Gewährleistungszeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Sanitätshaus.

Hergestellt in Dänemark von:

byACRE ApS

Bygmarken 4

3520 Farum

Denmark

by  **ACRE**